

PUHDISTUSSUIHKE HAAVOILLE JA SILMILLE

(fi) **SUOMI Käyttötarkoitus:** Steriili isotoninen suolaliuos haavojen ja silmien huuhteluun/puhdistamiseen. **Kohderyhmä:** Kaikenikäisille. Laite on tarkoitettu käytettäväksi itsehoidossa, laitoksissa ja työpaikoilla ilman teknistä kokemusta tai koulutusta. Voidaan käyttää piilolinssien kanssa. **Ohjeet:** Suihkuta suihketta pieni määrä suuttimen läpi ennen käyttöä. Pidä tölkkiä missä tahansa kulmassa, ≥ 10 senttimetrin etäisyydellä hoidettavasta haavasta tai silmästä. Suihkuta suihketta haavan tai silmän päälle kauttaaltaan puhdistaaksesi ja huuhdellaksesi sen perusteellisesti.

Sisältö: Fosfaattipuskuroitu suolaliuos (0,9% NaCl).

Säilytys: Säilytä 15...30°C käyttömukavuuden vuoksi. **Säilyvyysaika:** 3 vuotta.

Varastointi-/ kuljetuslämpötila: -20-40°C.

Varotoimenpiteet: Vältä suoraa kosketusta suuttimen ja haavan/silmän välillä. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tila jatkuu tai pahenee. Jos laitteeseen liittyy vakava vaaratilanne, ilmoita asiasta paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja valmistajalle.

Varoitus: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. Suojaa auringonvalolta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Hävittäminen: Noudata paikallisia ohjeita paineistettujen säiliöiden turvallisesta hävittämisestä.

RENGÖRINGSSPRAY FÖR SÅR OCH ÖGON

(sv) **SVENSKA Avsedd användning:** Steril isoton saltlösning för sköljning/rengöring av öga och sår. **Målgrupp:** För alla åldrar. Kan användas för egenvård, på institutioner och arbetsplatser utan teknisk erfarenhet eller utbildning. Kan användas med kontaktlinser. **Instruktioner:** Spraya en liten mängd genom munstycket före användning. Håll flaskan i valfri vinkel, på ett avstånd om ≥ 10 cm från såret eller ögat som ska behandlas. Spraya över hela såret/ögat för att rengöra och skölja ordentligt.

Innehåll: Fosfatbuffrad koksaltlösning (0,9% NaCl).

Förvaring: Förvara mellan 15 och 30°C, för bekväm användning.

Hållbarhet: 3 år. **Förvarings-/ transporttemperatur:** -20-40°C.

Försiktighetsåtgärder: Undvik direkt kontakt mellan munstycket och såret/ögat. Sök läkarvård om tillståndet kvarstår eller förvärras. Om någon allvarlig händelse inträffar i samband med produkten, rapportera till den lokala behöriga myndigheten och tillverkaren.

Varning: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Skyddas från solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering: Följ lokala föreskrifter för säker kassering av trycksatt behållare.

